



DENTO-VIRACTIS HAND DISINFECTION 35 GEL

DENTO-VIRACTIS

Description	Dento-Viractis 35 GEL est recommandé pour le traitement hygiénique et chirurgical des mains en l'absence de points d'eau. 
Domaines d'application	Usage sur tout type de peau, même les plus sensibles.
Caractéristiques	<ul style="list-style-type: none">✓ Actif en 30 secondes sur les virus de la gastro-entérite (Norovirus) et de la grippe (Influenza virus type A/H1N1).✓ Formule enrichie en glycérine, agent cosmétique naturel, adapté pour une utilisation fréquente.
Présentation commerciale	Le flacon de 100 ml La bouteille de 1 litre Le bidon de 5 litres Accessoires : La pompe doseuse de 20 ml

Activité antimicrobienne			Temps de contact
Bactéricide	EN 1040	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus	30 sec
	EN 13727	Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Enterococcus hirae, Acinetobacter baumannii	30 sec
	EN 13697	Clostridium difficile	5 min
Levuricide	EN 1275	Candida albicans	30 sec
	EN 13624	Candida albicans	30 sec
Virucide	EN 14476	Rotavirus SA11	5 min
		Influenza virus type A/H1N1	10 sec
		Norovirus	30 sec
		Herpès virus	15 sec
In vivo	EN 1500	Escherichia coli	3ml / 30 sec
	EN 12791	Flore microbienne cutanée	2 x (4,5ml x 1 min)



DENTO-VIRACTIS HAND DISINFECTION 35 GEL

DENTO-VIRACTIS

Composition	Ethanol 52% (m/m), Propane-2-ol 18% (m/m), Aqua, Glycerin, Acrylates/C10-30 alkylacrylate crosspolymer, Triethnolamine.
Précautions	Utiliser les produits biocides avec précaution. A utiliser sur une peau saine. Craint le gel.
Mode d'emploi	Utiliser sur mains propres et sèches. TRAITEMENT HYGIÉNIQUE: Appliquer 3ml (2 pressions de pompe) pendant 30 secondes. Frictionner les mains et les avant-bras jusqu'à séchage complet. TRAITEMENT CHIRURGICAL: Appliquer 4,5ml (3 pressions de pompe) pendant 1 minute. Frictionner les mains et les avant-bras, coudes inclus, jusqu'à séchage complet. Réaliser une seconde friction, coudes exclus.

Etiquetage :

Pas de symbole de danger.

Phrases de risque :

R10: Inflammable.

Phrases de sécurité :

- S2: Conserver hors de la portée des enfants.
- S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Autres recommandations :

- Eliminer l'emballage vide et les produits non utilisés conformément aux prescriptions du règlement municipal d'élimination de ces déchets, par exemple par apport en déchèterie, le recyclage de l'emballage sera dans ce cas proscrit.
- Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau.
- Produit à usage professionnel.
- Fiche de données de sécurité disponible sur www.dentoviractis.com

Version de la fiche: 1.0

HYGITECH
www.hygitech.com
25, rue Bleue
75009 Paris - FRANCE
Tel : +33 (0)1 48 01 32 89