

Récapitulatif



| Inserts | Modes maximum préconisés | | | | Réglage Fin* | Irrigation ml/min |
|---------|--------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| BS1S | D1 | D2 | D3 | D4 | | 60 |
| BS1L | D1 | D2 | D3 | D4 | | 60 |
| BS2L | D1 | D2 | D3 | D4 | | 60 |
| BS2R | D1 | D2 | D3 | D4 | | 60 |
| BS4 | D1 | D2 | D3 | D4 | | 60 |
| BS5 | D1 | D2 | D3 | D4 | | 60 |
| BS6 | D1 | D2 | D3 | D4 | | 60 |
| SL1 | D1 | D2 | D3 | D4 | | 60 |
| SL2 | D1 | D2 | D3 | D4 | | 60 |
| SL3 | D1 | D2 | D3 | D4 | | 50 |
| SL4 | D1 | D2 | D3 | D4 | | 30 |
| SL5 | D1 | D2 | D3 | D4 | | 30 |
| TKW1 | D1 | D2 | D3 | D4 | | 100 |
| TKW2 | D1 | D2 | D3 | D4 | | 100 |
| TKW3 | D1 | D2 | D3 | D4 | | 100 |
| TKW4 | D1 | D2 | D3 | D4 | | 100 |

* Non applicable sur PIEZOTOME SOLO (LED).

Récapitulatif



| Inserts | Modes maximum préconisés | Réglage Fin* | Irrigation ml/min |
|---------|---|--------------|-------------------|
| TKW5 | D1 D2 D3 D4 | 1 | 30-40 |
| CS1 | D1 D2 D3 D4 Mandibule Maxillaire | 1 à 3 | 80-100 |
| CS2 | D1 D2 D3 D4 Mandibule Maxillaire | 1 à 3 | 80-100 |
| CS3 | D1 D2 D3 D4 Mandibule Maxillaire | 1 à 3 | 80-100 |
| CS4 | D1 D2 D3 D4 Mandibule Maxillaire | 1 à 3 | 80-100 |
| CS5 | D1 D2 D3 D4 Mandibule Maxillaire | 1 à 3 | 80-100 |
| CS6 | D1 D2 D3 D4 Mandibule Maxillaire | 1 à 3 | 80-100 |
| LC1 | D1 D2 D3 D4 | 1 à 3 | 60-80 |
| LC190° | D1 D2 D3 D4 | 1 à 3 | 60-80 |
| LC2 | D1 D2 D3 D4 | 1 à 3 | 60-80 |
| LC2L | D1 D2 D3 D4 | 1 à 3 | 60-80 |
| LC2R | D1 D2 D3 D4 | 1 à 3 | 60-80 |
| NINJA™ | D1 D2 D3 D4 | 1 à 3 | 60-80 |
| CE1 | D1 D2 D3 D4 | 1 à 3 | 60-80 |
| CE2 | D1 D2 D3 D4 | 1 à 3 | 60-80 |
| CE3 | D1 D2 D3 D4 | 1 à 3 | 60-80 |

* Non applicable sur PIEZOTOME Solo (LED).